

Verbandplatten

Arbeitsmittel

Zur Herstellung:

- Erkodur, 1,0 - 2,0 mm
- Erkocryl, 1,5 und 2,0 mm

Wenn erforderlich:

- Zum Anpolymerisieren von Klammern: Resilit-S (817 501) (817 503) autopolymerisierender Kunststoff
- Zur Herstellung eines Einbisses des Gegenkiefers: Erkoform-3d,-3/Occluform-3 (Erkoform-RVE/Occluform)
- Zur Modellisolierung und Schrumpfausgleich ab Werk aufgebrachte Isolierfolie zum Modell hin mit tiefziehen (Erkodur)

Zur Modellvorbereitung:

- Erkogum (110 844) zum Ausblocken, hochschmelzendes Wachs (725 080) zum Füllen von Blasen im Gips
- Erkoskin (625 050) zur Entlastung des Zahnfleischsaums

Zur Ausarbeitung:

- Empfehlung: Ausarbeitungsset Quick 2 (110 877) mit Stichfräser rechtsschneidend, linksspiralig (110 836) zum groben Ausschneiden, HSS-Spiralbohrer (110 876) zum Ausschneiden der gewünschten Form, kreuzverzahnte HM-Fräse (110 837) zum fein Beschleifen, zum Vorpulieren der Ränder, Lisko-S (223 200) und enger Interdentalräume, Liskoid (223 205)
- Polierset (110 878) zum Polieren

Tipps

- Die Herstellung und Ausarbeitung entspricht exakt der von Minioplastschienen oder Stabilisierungsschienen.
- Modellbereiche (äußeres Vestibulum, Mundboden), die die Anformung behindern, müssen abgetragen werden. Scharfe Gipskanten brechen.
- Bei Schienen, die über den Zahnfleischsaum hinausgehen, sollte dieser durch Auftragen einer Schicht Erkoskin entlastet werden.


1. Wenn nötig (siehe Tipps), auf den Zahnfleischsaum Erkoskin auftragen.

Die Modelle soweit in das Edelstahlgranulat einbetten, dass nur der tiefziehende Bereich plus 3 mm aus dem Granulat ragt.




2. Tiefziehen.

3. Tiefgezogene Platte zur leichteren Entformung mit dem Stichfräser (> 20 000 U/Min.) mehrfach einschneiden.

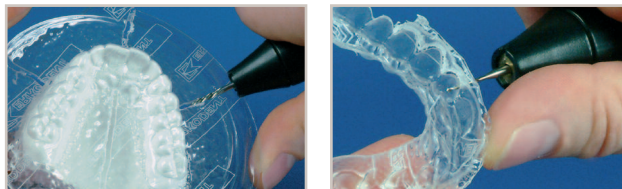

4. Mit dem HSS-Spiralbohrer ohne Druck (> 20 000 U/Min.) die gewünschte Form ausschneiden.

5. Stärkere Verbandplatten (2,0 mm) finden meistens genügend Retention, wenn sie nur die palatinale Flanke der Zähne bedecken.

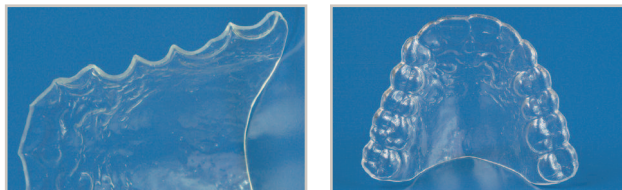

6. Dünne Verbandplatten (1,0 und 1,5 mm) überdecken die Zahnreihe bis knapp über die vestibuläre Kante.

Bitte die Reinigungs- und Pflegehinweise (pflege.pdf) beachten.