

Herzlich
Willkommen

zum

Erkodent
Workshop

Erki-Technik
Nagelkorrektur



Überblick...

Was ist Nagelkorrektur?

- Spangenarten
- Wirkungsprinzip

Technische Daten

Warum Klebespangen?



- Gründe für Klebespangen
- Vor- u. Nachteile

Hilfsmittel

Wichtiges!

- Tipps / Info's
- Kalkulation

ERKI-Technik

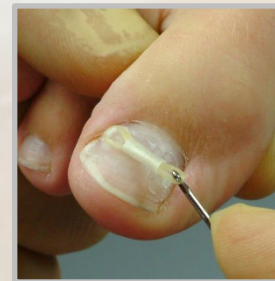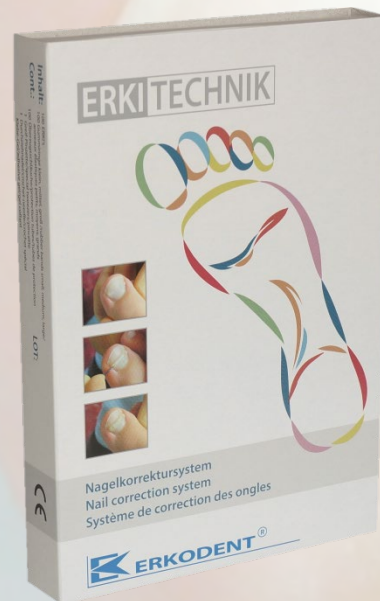

Spangenarten

Klebespangen

Metall

- Goldstadt 1990
- ONYCLIP 1990

Metall / Kunststoff

- Podofix 2008
- Combiped 2010

Kunststoff

- **ERKI-Technik 1980**
- BS-Spange 1989

Orthonyxiespangen

Metall

- Ross Fraser
- 3TO
- VHO
- ORA

ONYCLIP



ERKI-Technik



Wirkungsprinzip

Klebespangen

- Alle Spangen wirken!
- Unterschiede:
 - Kraft
 - Zeit
 - Anwendung



Technische Daten


Material:
Maße (LxBxH):

Befestigung:
Sonstiges:

Mindesthaltbarkeit:
Medizinprodukt:


Erki-Technik

Kunststoff
6,5 x 3 x 2 mm
Ø 3.2, 4.8 u. 6.35 mm
Sekundenklebegel
transparent
Gummiringe Latex
Keine
Ja, Klasse 1

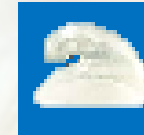

Gründe für Nagelkorrektur

- Schnelle Schmerzbeseitigung
- Langfristige Korrektur
- Keine operativen Eingriffe
- Keine Ausfallzeiten
- Ambulante Behandlung

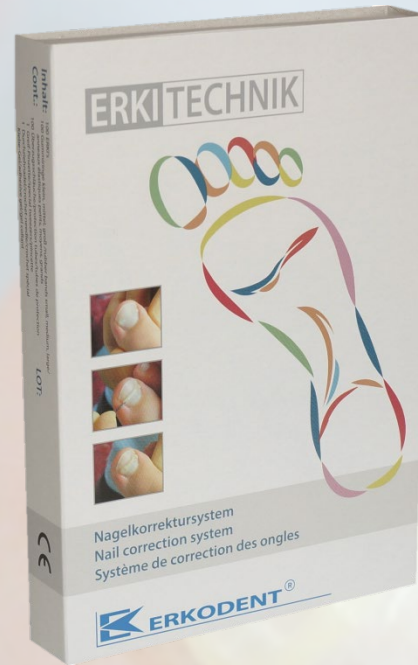

Inhalt:
 100x Erki's
 100x Gummiringe, Gr. S
 100x Gummiringe, Gr. M
 100x Gummiringe, Gr. L
 100x Überzugsschläuche
 3x Klebe-Gel, 1g
 1x Durchziehnadel
 1x Pinzette
 1x Anleitung



Erki-Technik Vorteile

- Einfache Handhabung
- Schmerzfrees aufsetzen
- Kleben ohne Krafteinwirkung
- Automatische Einstellung auf die neue Situation
- 2-Punkt-Verklebung
- 3 Zugkräfte einstellbar
- Individuelle Formgebung
- Starke Zugkraftentwicklung

Nachteile

- Höhe ca. 2 mm
- Keine Lackierung möglich
- Nicht in Nagelfalz einsetzbar



Entfetten



Glätten



Aufkleben



Einhängen




Fixieren

Hilfsmittel für Erki-Technik

- Entfetter

Alternative:

- Aceton

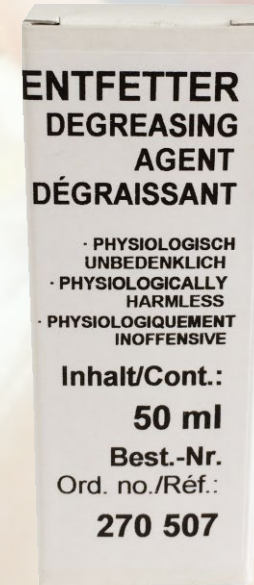

Kalkulation

Grundsätzlich gilt

Mögliche Abrechnung

➔ Preise individuell kalkulieren

➔ Privat
Kassenabrechnung per KV

HMP4 Nr.: X8400; X8510; X8520 können
als Grundlage für den KV dienen!



Kalkulation

Erki-Technik	Neukunde	Nachbehandlung
Materialkosten:	2,79 €	0,19 € (Spange, Entfetter, Seitenschneider, Rundzange)
Arbeitszeit:	15,00 €	5,00 € (20 Minuten à 0,75 €)
Herstellkosten 1:	17,79 €	5,19 €
Lohnnebenkosten:	4,63 €	1,35 € (Sozialversicherung, Urlaubsgeld)
Herstellkosten 2:	22,42 €	6,54 €
Betriebliche Gemeinkosten:	8,52 €	2,49 € (Miete, Mitarbeiter, Telefon, KFZ usw.)
Herstellkosten 3:	30,94 €	9,03 €
Gewinn 10%:	3,10 €	0,90 € (nach eigenem Ermessen)
Gesamtkosten netto	34,04 €	9,93 €
+ 19 % MwSt.	6,47 €	1,89 €
Gesamt brutto:	40,51 €	11,82 €

**Denken Sie
daran...**

ERKI's nicht zu stark andrücken

ERKI's nicht bewegen während des Klebens

ERKI's mit der Hakenöffnung zum Nagelfalz aufkleben

Gummiringe erst nach ca. 2 Min. einhängen

Nageloberfläche reinigen

Nageloberfläche glätten

**Vielen
Dank!**



Erkodent Erich Kopp GmbH
Siemensstraße 3,
72285 Pfalzgrafenweiler
info@erkodent.com
www.erkodent.com

