

Schnellhärtender Kunststoff (Autopolymerisat auf Basis Methylmethacrylat)

Kennzeichnung:

Beiliegende Dokumente beachten



Gebrauchsanweisung beachten



Einmaliger Gebrauch




For prescription use only

Lagerung:


Trocken lagern



Vor Sonnenlicht geschützt lagern

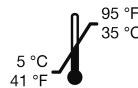

Empfohlene Lagertemperatur

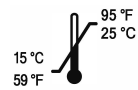

Empfohlene Verarbeitungstemperatur

Anwendung:

- Fixierung von Nagelkorrekturspangen
- Modellherstellung für Fraser-Spange.

Verarbeitung:

- Onychofix Spritze nach Gebrauch umgehend schließen.
- Onychofix kühl lagern.

Eigenschaften:

In der Endphase der Aushärtung entwickelt sich durch exotherme Reaktion etwas Wärme.
Die Aushärtungszeit beträgt ca. 1 Minute.

Die Verwendung und Anwendung unserer Produkte liegt ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. Unsere schriftliche oder mündliche Beratung gilt, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, als unverbindlicher Hinweis. Eine Befreiung von der Pflicht zur eigenen Prüfung unserer Produkte auf ihre Tauglichkeit für die beabsichtigte Anwendung ist dadurch nicht gegeben. Die einwandfreie Qualität unserer Produkte wird nach Maßgabe unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen gewährleistet. Unsere Haftung ist in jedem Falle und für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten Ware beschränkt.



(Hersteller)

Erkodent Erich Kopp GmbH • Siemensstraße 3 • 72285 Pfalzgrafenweiler • Germany
Tel. + 49 (0) 74 45/85 01-0 • Fax + 49 (0) 74 45/85 01-15 • info@erkodent.com • www.erkodent.com

EN ISO • 13485:2016 • ISO 9001:2015

Labeling:



Consult accompanying documents



Read instruction for use



Single use only



For prescription use only


Storage:




Keep dry



Keep away from sunlight

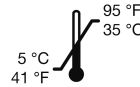

Recommended storage temperature

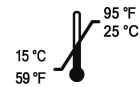

Recommended working temperature

Areas of application:

- Fixing of nail correction clasps
- Model fabrication for Fraser clasps

Processing:

- Close Onychofix syringe immediately after use.
- Store Onychofix in a cool place.

Characteristics:

During the final stage of setting some heat develops due to the polymerisation reaction.

Setting time is approx. 1 min.

The user of our products is the only person responsible for the use and the application of our products. Our verbal and written advice has to be considered as advice without obligation also regarding possible protection rights of third parties. The user is not exempt from the obligation to check our products personally concerning suitability for the intended application. The perfect quality of our products is guaranteed according to our General Terms and Conditions. In any case and for all damage our liability is limited to the value of the goods supplied by us.



(manufacturer)

Erkodent Erich Kopp GmbH • Siemensstraße 3 • 72285 Pfalzgrafenweiler • Germany
 Tel. + 49 (0) 74 45/85 01-0 • Fax + 49 (0) 74 45/85 01-15 • info@erkodent.com • www.erkodent.com

EN ISO • 13485:2016 • ISO 9001:2015

