

Onycholit

Gebrauchsanweisung

Instruction for use

Schnellhärtender Kunststoff (Autopolymerisat auf Basis Methylmethacrylat)
Quick setting acrylic material (Self-curing resin basing on methyl methacrylate)



Beiliegende Dokumente beachten
Consult accompanying documents



Gebrauchsanweisung beachten
Read instruction for use



Vor Sonnenlicht geschützt lagern
Keep away from sunlight



Trocken lagern
Keep dry

5 °C/41 °F 

35 °C/95 °F
Empfohlene Lagertemperatur
Recommended storage temperature

15 °C/59 °F 

25 °C/77 °F
Empfohlene Verarbeitungstemperatur
Recommended working temperature

Anwendung:

- Fixierung von Nagelkorrekturspangen
- Modellherstellung für Fräser-Spange

Verarbeitung:

- Onycholit Pulver und Flüssigkeit zu sahnartiger Konsistenz anmischen.
- Zuerst die Flüssigkeit in ein Anmischälchen geben, dann Pulver hinzugeben!
- Verarbeitungszeit ca. 4-6 Minuten.

Eigenschaften:

In der Endphase der Aushärtung entwickelt sich durch exotherme Reaktion etwas Wärme.
Die Endaushärtungszeit beträgt 24 Stunden.
Die Pulver sind untereinander mischbar.

Areas of application:

- Fixing of nail correction clasps
- Model fabrication for Fraser clasps

Processing:

- Mix Onycholit powder and liquid to a creamy consistency.
- First pour the liquid into a mixing bowl, then add the powder!
- Processing time approx. 4-6 minutes.

Characteristics:

*During the final stage of setting some heat develops due to the polymerisation reaction.
The final curing time is 24 hours.
The powders can be mixed with each other.*

Die Verwendung und Anwendung unserer Produkte liegt ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. Unsere schriftliche oder mündliche Beratung gilt, auch im Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, als unverbindlicher Hinweis. Eine Befreiung von der Pflicht zur eigenen Prüfung unserer Produkte auf ihre Tauglichkeit für die beabsichtigte Anwendung ist dadurch nicht gegeben. Die einwandfreie Qualität unserer Produkte wird nach Maßgabe unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen gewährleistet. Unsere Haftung ist in jedem Falle und für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten Ware beschränkt.

The user of our products is the only person responsible for the use and the application of our products. Our verbal and written advice has to be considered as advice without obligation also regarding possible protection rights of third parties. The user is not released from the obligation to check our products personally concerning suitability for the intended application. The perfect quality of our products is guaranteed according to our General Terms and Conditions. In any case and for all damage our liability is limited to the value of the goods supplied by us.



(Hersteller/manufacturer)

Erkodent Erich Kopp GmbH • Siemensstraße 3 • 72285 Pfalzgrafenweiler, Germany
Tel. + 49 (0) 74 45/85 01-0 • Fax + 49 (0) 74 45/85 01-15 • info@erkodent.com • www.erkodent.com
EN ISO 13485 • ISO 9001

 ERKODENT®