

Duplicazione

Materiali

Per la realizzazione:

- Erkoflex, 3,0-5,0 mm

Per la preparazione del modello:


- Cera ad alto grado di fusione (725 080) per chiudere bolle del gesso.

Suggerimenti

- I duplicati realizzati in Erkoflex non raggiungono la precisione dei materiali di duplicazione. Questo metodo molto economico è indicato per modelli dimostrativi, di addestramento e progettazione.

1. Rettificare la base del modello, posizionare sulla piastra portamodelli dell'apparecchio di termoformatura e termoformare.

Lasciare raffreddare completamente.

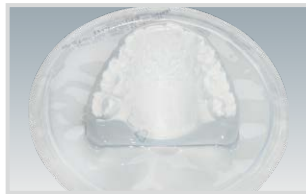

2. Come illustrato nella figura, posizionare il termoformato Erkoflex su un anello o un contenitore, in modo che il negativo appoggi solo per la parte esterna.

Colarvi il gesso con il vibratore.

