

Kosmetische Schiene

Arbeitsmittel

Zur Herstellung:

- Erkodur-0M1/-A1/-A2/-A3, 0,6-2,0 mm (2,0 mm, wenn die Schiene adjustiert werden soll)
- Für einen eventuellen Einbiss: Erkoform Gerät der Serie 3 / Occluform-3

Zur Modellvorbereitung:

- Modellierwachs zur Wiederherstellung der Zahnreihe

Zur Ausarbeitung:

- Empfehlung: siehe Aufbisschienen
- Eine fein korundierte oder diamantierte flexible Scheibe zur Gestaltung der Interdentalräume, Polierset (110 878) zum Polieren



Tipps

- Modellbereiche (äußeres Vestibulum, Mundboden), die die Anformung behindern, müssen abgetragen werden. Scharfe Gipskanten brechen.
- Zur Isolierung und Schrumpfausgleich ab Werk aufgebrauchte Isolierfolie zum Modell hin mit tiefziehen.
- Herstellung siehe Miniplastschiene, Seite 4 und 5. Die Schienen dienen zum Aufstecken auf die eigene, kosmetisch ungünstige Zahnreihe.

1. Kosmetisch ungünstige Ausgangssituation, z. B. nach einem Unfallgeschehen. Die Schiene dient dann auch zur Stabilisierung.



2. Die Zahnreihe wird am besten mit Modellierwachs wieder hergestellt.

3. Zum Tiefziehen sollte das Modell dubliert werden.



4. Um ein besseres ästhetisches Bild zu erhalten, werden die Interdentalräume deutlicher hervorgehoben ...

Tiefziehen und Ausarbeiten siehe S. 4 und 5, Miniplastschiene.

5. ... am besten mit einer fein korundierten oder diamantierten flexiblen Scheibe.



6. Fertige kosmetische Schiene aus Erkodur-A1.

Bitte die Reinigungs- und Pflegehinweise beachten.