Erkoform-3d +

Instructions





Erkoform-3d+

Appareil de thermoformage sous vide avec contrôle de température sans contact (EP 1 905 380), pré-vide et écran tactile Chauffage infrarouge à ondes moyennes avec couvercle

Poignée de réception de plaque avec creux de prise

Branchement au secteur

réception de feuille et anneau de serrage

Vitre du capteur pour capture de température

Colonne pour faire tourner la réception de feuille

Pot de forme pour réception du pot de granulés, disque pour modèle et pot de modèle Occluform-3 (Occluform-3, 188 580)

Écran tactile pour utiliser toutes les fonctions

Interrupteur principal Récipient pour granulés





Disque pour modèle* pour des modèles



Disque pour modèle* pour des modèles travaillés très plat ** fait partie de la livraison*



Erkodent Erich Kopp GmbH • Siemensstraße 3 • 72285 Pfalzgrafenweiler • Allemagne Tel.: +49 (0) 74 45 85 01-0 • Fax: +49 (0) 74 45 85 01-15 • www.erkodent.com • info@erkodent.com

Données techniques:

Mesures:	hauteur largueur profondeur poids	315 mm 350 mm 370 mm 11,8 kg	Chauffage:	radiateur infrarouge ondes moyennes volt: ~220 - 240 (100, watt:	à 110-120) 280-300
Mesures plaques	:diamètre épaisseur (120 mm) - 5,5 mm	Capteur:	capteur de température infrarouge sans contact plage de mesures programmable jusqu'à	
Pot de forme:	Ø intérieur hauteur intérieure	101 mm 42 mm			
Électricité:	volt: ~220 - 240 (100, 110 - 120) watt: 340 (chauff. incl.)		Vide:	avec pré-vide	
Fusible:	2 x T- 2 A (230/240 2 x T- 4 A (100/115	V) ou V)		capacité niveau sonore	9 L/min 60 db(A)

Sécurité

Lire le mode d'emploi avant la mise en service de l'appareil. L'opérateur de l'appareil est responsable pour l'observance des prescriptions de prévention des accidents. La construction de l'appareil Erkoform-3d + considère les normes légales qui sont listées dans le certificat de conformité ci-joint (documents de l'appareil).

Indications de sécurité

ATTENTION! Risque de brûlure, ne pas toucher le radiateur, le boîtier pour l'élément de chauffage et des plaques chaudes! Utiliser l'appareil seulement sous surveillance. Ne pas stocker des matières facilement inflammables à proximité de l'appareil. Ne chauffer et ne traiter que des matériaux de thermoformage appropriés.

Utilisation conforme à sa destination

Utiliser avec l'appareil Erkoform-3d + seulement des matériaux de thermoformage appropriés d'un diamètre de 120 mm et d'une épaisseur jusqu'au 5,5 mm pour l'adaptation sur des modèles appropriés. Autrement, nous déclinons toute responsabilité du fait des produits.

Nettoyage et maintenance

Pour nettoyer l'appareil n'utiliser qu'un chiffon humide. Ne pas utiliser ni de détergent ni de nettoyant. Afin de garantir le bon fonctionnement de l'appareil, il faut remplacer les joints chaque année en cas d'utilisation intensive. Bien presser les nouveaux joints dans les rainures sans provoquer d'irrégularités.



Joint réception de feuille 188 011



Joint pot de forme 188 017

Instructions d'installation: Pour éviter que l'eau ou les saletés

pénètrent dans l'appareil, celui-ci doit se trouver dans un environnement sec et sans poussière.

Laisser l'appareil froid (transport, stockage ou autres) se réchauffer pour 2 heures à température ambiante d'au moins 15 °C pour éviter la formation d'eau de condensation.

Mise en service

Introduire la fiche derrière dans l'appareil. Brancher la fiche-réseau à une prise de courant, l'appareil est prêt à l'usage. Débrancher l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.

Recommandation:

Ne faire marcher l'appareil que lorsqu'il est rempli de granulés (ill.). Pour remplir, guider la réception de plague dans la position supérieure droite. Lisser les granulés, les granulés superflus tombent dans une goulotte circonférentielle et peuvent être évacués avec un pinceau dans le récipient pour granulés. Il ne doit pas y avoir des granulés sur les joints.



Les symboles de l'écran tactile:









annuler



aiouter favori





menu principal

épaisseur de



continuer

température de



lire les instructions liste de plaques

retour







chauffage arrêt

mise en route

changer spécifi











ok continuer



Mettre l'appareil en marche

Mettre l'appareil en marche en appuyant l'interrupteur principal.

Un image sur l'écran tactile rappelle à nettoyer la vitre de capteur. Une vitre de capteur crasseuse causera des erreurs de mesuration. Si nécessaire, dépoussiérer ou nettoyer avec un drap humide (pas des détergents!).

Après quelques secondes on voit automatiquement l'écran de base.

L'écran tactile réactionne dans les panneaux encadrés sur une pression légère.



Pour l'entrée le pinceau pour granulés annexé est équipé avec un bouchon en caoutchouc. Une entrée avec les doigts est également possible.



interrupteur principal



vitre de capteur

Sélectionner langue: En cas de chaque redémarrage la langue ultérieurement sélectionnée

1. Sélectionner panneau langue



- 2. Sélectionner langue
- Sélectionner plaque Example, Erkodur, épaisseur 1 mm

La liste des plaques contient toutes les plaques du programme Erkodent façonnables avec cet appareil et livrables à la date de la production de l'appareil.

Entrer nouvelle plaque, page 6

1. Sélectionner liste des plaques



4. Plaque sélectionnée



- Mémoriser des favoris, page 5
- 2. Sélectionner Erkodur



Fonctions de cette indiqua



3. Menue, langue sélectionnée



Faire défiler la liste des plaques



retour menue continuer

Sélectionner 1,0 mm



- plaque sélectionnée
- température finale
- temps de refroidissement
- travailler avec Occluform-3
- changer temp. finale et temps de refroidissement
- mémoriser comme favori
- menue
- OK, prochaine étape
- une étape en retour

3

Thermoformer (voir également page 10)



1. Plaque correcte (?), confirmer

Dès que la plaque est confirmée, l'affichage montre les prochaines étapes de travail.

Autres fonctions de cet affichage (voir page 10).

Indication: Annuler: appuyer X

Thermoformer avec Occluform-3

2. Plaque est chauffée. Dès que la réception de feuille arrive à un bon enclenchement au-dessous le chauffage l'affichage montre la temp. de feuille.

70°C avant d'atteindre la temp. finale, la pompe à vide se met en marche pour créer le pré-vide.

3. Attention! Processus de thermoformage

10 °C avant d'atteindre la température finale, un signal acoustique et optic ainsi que l'indication "Thermoformer quand les lumières sont au vert!" invitent à thermoformer.

4. Temps de refroidissement

Le temps de refroidissement se déroule après le processus de thermoformage.

au 2. et 3.

Pendant le chauffage la réception de feuille peut être brièvement tournée (max. 3 sec.) en direction de la position initiale.

Erkodur 1.0 mm Erkodur 1,0 mm Erkodur 1,0 mm Occluform 160 °C 160 9 00:45



- 1. Sélectionner Occluform et confirmer.
- 2. comme au-dessus

Indication: Lors d'utilisation d'une plaque Playsafe triple l'appareil invite seulement 1 min. après le thermoformage à fermer l'Occuform-3

3. comme au-dessus, le processus de thermoformage se déroule lorsque la température finale est atteinte

4. Invitation de fermer l'Occluform-3.

Après le temps de refroidissement est affichée.

Mémoriser des favoris

La liste des favoris sert à plus facilement retrouver des plaques utilisées couramment. Pour ajouter une plaque à la liste des favoris, la plaque est sélectionnée comme décrit dans la section "sélectionner une plaque". Des nouvelles plaques, soit des futures plaques Erkodent soit des plaques d'autres entreprises sont ajoutées moyennant le panneau de fonction "nouvelles plaques" et sont mémorisées dans la liste des favoris.

Après avoir sélectionné la plaque demandée de la liste des favoris, l'affichage comme visible au point **1.** apparaît. Pour mémoriser la plaque comme favori, sélectionner "aux favoris".

 Sélectionner ajouter favori



Effacer des favoris

2. Confirmer ajouter favori



3. Le favori est affiché et peut être travaillé





Recommandation: Si une plaque Erkodent doit être mémorisée avec des paramètres ex usine et des paramètres modifiées comme favori, il est recommandé d'entrer la version modifiée comme nouvelle plaque avec un nom changé pour exclure une confusion.

Entrer une nouvelle plaque

Des nouvelles plaques peuvent être des plaques futures d'Erkodent ou des plaques inconnues. Si Erkodent offre une nouvelle plaque les données nécessaires se trouvent sur l'étiquette (exemple: Erko nouveau, épaisseur 1,8 mm, température finale 150 °C, temps de refroidissement 1:40 min.). La plaque est mémorisée à l'entrée "nouvelles plaques". En cas des plaques inconnues il faut déterminer la température finale et le temps de refroidissement à l'aide des fonctions spéciales. Les nouvelles plaques sont mémorisées dans la liste des favoris et sélectionnées de cette liste.

Indication: Comme temp. finale on ne peut entrer que 240 °C au max.. Entrer au moins 30 sec. comme temps de refroidissement. Autrefois on risque des erreurs de fonctionnement.



6. Sélectionner 7. Sélectionner 8. Thermoformer 5. Entrer temps de nouvelle plaque refroidissement favoris nouvelle plaque Erko neu 1,8 mm Erko neu 1,8 mm Liste des plaques 1:40 150 °C 💥 01:40 Favorites Occluform * Nouvelles plaques Fonctions speciales Lanque

Au 2., la nouvelle plaque est mémorisée aux favoris, le menu affiche.

Changer les paramètres ex usine pour les plaques

La température finale est le temps de refroidissement peuvent être changés pour un seul processus de thermoformage, ou, comme favori, durablement. La température finale (détermination d'usine) peut être changé par max. +/- 5 °C. Les changements sont fait dans la vitre "plaque sélectionnée" ou "favori", voir également "sélectionner plaque" et "mémoriser favori".

1. Sélectionner changer



2. Changer temp. finale et temps de refroid.

1,0 mm

3. Thermoformer ou mémoriser comme favori



Annuler Mémoriser



Thermoformer une de plaque s fois avec les valeurs maintenus. choisies

Mémoriser comme favori. Comme favori les valeurs choisies et le nom de plaque sont maintenus.

Occluform-3



Dispositif optionnel Occluform-3 (188 580) pour imprimer l'antagoniste.

La construction se base sur un triangle Bonwill avec une longueur des côtés de 11,5 cm et sur un angle Balkwill de 20°.

Fonctions spéciales

En utilisant les fonctions spéciales le chauffage et la pompe à vide peuvent être mises en et hors marche indépendamment du programme.

Pour déterminer la température finale (temp. de thermoformage) d'une plaque inconnue sélectionner "mise en route chauffage" (2.) et insérer la plaque comme décrit à "thermoformage". Dès que la réception de plaque soit tournée sous le chauffage (a), celui-ci se met en marche et le capteur mesure la temp. de la plaque. Si ensuite la plaque doit être thermoformée, sélectionner "démarrage pompe" (3.).

Indication, si la réception de feuille est placée sur le pot de modèle et le vide est mise en marche, la pompe à vide est en marche mais le vide ne se déclenche **pas**.

Sélectionner fonctions spéciales

pompe a vide arreit pompe a vide marche

chauffage marche

Pour vérifier si la plaque est prête à thermoformer, tourner la plaque vers l'extérieur (**b**) est tâterla avec un instrument obtus, s'il restent des bulles permanentes, la plaque est, en générale, prête à thermoformer. Le chauffage arrête, si la plaque est tournée hors de la zone de chauffage, si on choisit "chauffage arrêt" ou le capteur mesure >240 °C.

La température indiquée par l'écran est la température mesurée ultérieurement. Si la plaque est prête à thermoformer, cela correspond à la température finale.

Pour déterminer le temps de refroidissement, chronométrer le temps à partir de la formation. Pour la première fois après 1 minute, tester la température de la plaque, avant il existe un risque de brûlure! On arrive au correct temps de refroidissement, si la surface de la plaque atteint app. température ambiante. La plaque peut maintenant être mémorisée comme mentionné sous "entrer une nouvelle plaque".





chauffage arrêt



Recherche:

erreur	cause possible	élimination (service après-vente – sav)	
appareil ne marche pas, pas de visualisation à l'écran tactile	prise, fiche femelle, fusibles défectueux	contrôler prise, fiche femelle et fusibles (à la fiche femelle)	
radiateur ne recuit pas	feuille de réception ne posi- tionnée pas correctement radiateur, interrupteur chauf- fage ou platine défectueux	feuille de réception doit s'enclen- cher au-dessous le chauffage échanger radiateur, interrupteur chauffage ou platine (sav)	
programme réactionne insen- sé	plantage du système, programme défectueux	activer/déactiver l'appareil, de nouveau installer le programme (sav)	
indication de température insensée	vitre de capteur crasseuse, capteur défectueux	nettoyer vitre du capteur, échanger capteur (sav)	
vide insuffisant	granulés sur les joints, trou dans la plaque, joints usés, pompe à vide crasseuse ou défectueuse	enlever les granulés des joints, contrôler si la plaque a des trous, remplacer les joints, nettoyer ou échanger la pompe à vide (sav)	
pompe à vide ne marche pas	membrane chassieuse membrane trop dure à une température ambiante sous 15 °C	nettoyer membrane (sav) laisser dégeler l'appareil app. 2 heures (à cause de form. d'eau de condensation) à temp. ambiante	

Thermoformer avec Occluform-3

*les étapes de travail nécessaires avant le thermoformage sont affichées par une animation répétitive.

Toutes animations sont arrêtées avec la prochaine étape de travail.



3. Sélectionner plaque désirée (dans l'exemple Erkoloc-pro)



1. Sélectionner liste de plaques



2. Faire défiler la liste de plaques



4. Sélectionner épaisseur de plaque



5. Sélectionner Occluform



6. Continuer, thermoformer*, pivoter la réception de feuille au-dessous ...



9. Invitation par l'amination de fermer l'Occluform-3.



7. ... le chauffage jusqu'à ce qu'elle s'enclenche(!). Le processus de chauffage commence.



10. Fermer l'Occluform-3 jusqu'à la butée, attendre le temps de refroidissement.



8. Thermoformer.



11. Desserrer l'anneau de serrage, enlever le pot de modèle de l'Occluform avec la feuille.

Forme de livraison pour Erkoform-3d+

Veuillez vérifier concernant l'intégralité.

Pièces:	Article:	Référence:
1	Erkoform-3d +	188 600
1	avec accessoires suivants: anneau de serrage de plaque pour serrer les plaques dans la réception de plaques	188 550
1	récipient pour granulés	188 470
1	disque pour modèle	188 507
1	pot de granulés	188 593
1	pinceau pour granulés avec bouchon en caoutchouc <i>utilisable également comme goupille d'entrée</i> (dans le kit d'essai des plaques)	188 530
1	on-off magnet rouge pour ramasser les granulés dispersés (dans le kit d'essai des plaques)	110 890
1	cordon électrique	188 001
1	bol de travaille blanc	222 100
1	granulés de remplissage (équipement initiale 1,8 kg) granulés en acier inoxydable (magnétique) de bords arrondis	110 852 (1,3 kg)
1	kit d'essai de plaques	
1	documents de la machine (chemise) instructions, manuel de technique de thermoform carte des matériaux, programme Erkodent,	mage,



carte de garantie, certificat de conformité