

Aton-Lab 80

Massa plasmabile (Putty) da laboratorio su base di vinil-polisilosane, polimerizzabile per addizione, altissima consistenza e stabilità dimensionale, modellabile

Massa siliconica impastabile per realizzare impronte di parti per riparazioni dentali in laboratorio, adatto per l'utilizzo di resine acriliche indurenti a freddo e a caldo, ecc. Per l'isolamento di denti artificiali, ecc., utilizzabile in bollitore.




Consultare i documenti di accompagnamento



Conservare al riparo della luce solare




Leggere le istruzioni d'uso

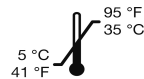

Temperatura di conservazione consigliata



Conservare all'asciutto

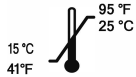

Temperatura di lavoro consigliata

Dosaggio:

Rapporto della miscela 1:11 misurino di livello (circa 18 g) per ciascun catalizzatore (bianco) e materiale di base (giallo).

Utilizzo:

Mescolare entrambi i componenti Aton-Lab 80 circa 30 sec. fino a quando la massa avrà un colore uniforme.

Suggerimenti:

Temperature ambiente più elevate accelereranno l'indurimento.

Attention:

Fare attenzione che il catalizzatore (bianco) non si contaminino. Non mescolare con guanti in lattice. Evitare di macchiare l'abbigliamento.

Per favore, non invertire cucchiari e coperchi.

Dati tecnici:

- la miscelazione può essere effettuata manuale o meccanica
- tempo di miscelazione **30 – 40 sec.**
- tempo di lavorabilità totale **1,5 min.**
- tempo di indurimento **4 min.**
- durezza Shore-A **app. 80**

L'utilizzatore dei nostri prodotti è l'unica persona responsabile dell'uso e dell'applicazione dei medesimi. La nostra consulenza verbale e scritta deve essere considerata come una consulenza senza impegno anche per quanto riguarda i possibili diritti di protezione di terzi.

L'utilizzatore non ha l'obbligo di controllare personalmente i nostri prodotti per quanto riguarda l'idoneità per l'applicazione prevista. La perfetta qualità dei nostri prodotti è garantita secondo i nostri termini e condizioni generali.

In ogni caso e per tutti i danni, la nostra responsabilità è limitata per il valore della merce da noi fornita.

