

Docce cosmetiche

Materiali

Per la realizzazione:

- Erkodur-0M1/-A1/-A2/-A3, 0,6-2,0 mm (2,0 mm, se occorre registrazione)
- Per un eventuale registrazione: Apparecchi Erkoform seria 3 / Occluform-3

Per la preparazione del modello:

- Cera per modellare per il ripristino dell'arcata dentaria

Per la finitura:

- Si raccomanda: vedi Bite occlusali - Per la configurazione degli spazi interdentali: disco flessibile con rivestimento in corindone o diamantato a granulometria fine, set per lucidare (110 878)



Suggerimenti

- Eliminare le zone del modello (vestibolo esterno, pavimento buccale), che possono compromettere la formatura. Spianare gli spigoli vivi del modello.
- Per isolare e compensare la retrazione termoformare con la pellicola isolante applicata all'origine rivolta verso il modello.
- Realizzazione vedi docce Miniplast. Docce cosmetiche servono per correggere l'aspetto estetico di arcate dentarie insoddisfacenti.

1. Situazione iniziale esteticamente insoddisfacente, ad es. dopo un incidente. In tale caso la doccia serve anche per stabilizzazione.



2. Si consiglia di ripristinare l'arcata dentaria con cera per modellare.

3. Per la termoformatura è opportuno duplicare il modello.



4. Per un aspetto estetico migliore, accentuare gli spazi interdentali ...

Termoformatura e finitura vedi docce Miniplast.

5. ... preferibilmente con un disco flessibile rivestito in corindone o diamantato a granulometria fine.



6. Doccia cosmetica in Erkodur-A1 finita.

Attenersi alle istruzioni per la pulizia e manutenzione.