

Erkoskin



Selbsthärtender Schutzfilm:

- auf Gips (trimmen) • auf Metall (abstrahlen) • auf Keramik (ätzen)
- Platzhalter in der Tiefziehtechnik (Druckentlastung, Bleachingschienen usw.)

Self hardening protective film:

- on plaster (trimming) • on metal (sandblasting) • on ceramics (etching)
- spacer for thermoforming (pressure release, bleaching splints etc.)

Film de protection autodurcissant:

- sur plâtre (ajuster) • sur métal (décaper) • sur céramique (dérocher)
- espaceur en thermoplastie (décharge de pression, attelles de blanchiment etc.)

Verarbeitungsanleitung

- elastisch, säure- und basenbeständig, reißfest, rückstandslos abziehbar
- Trockenzeit, max. 10 Min.
- nur kurzzeitig öffnen, dicht verschlossen und kühl lagern
- mit Instrument oder Pinsel auftragen (Pinsel sofort mit Wasser auswaschen)
- nicht direkt einatmen, stechender Geruch
- nach Augen- oder Schleimkontakt mit viel Wasser spülen
- entspricht der BGA-Empfehlung Nr. XXI

Instructions for use

- elastic, acid and base-resistant, tearproof, can be taken off without residues
- drying time, max. 10 min.
- only open container for a short time, tightly close and store at a cool place
- apply with an instrument or brush (wash out brush immediately with water)
- do not inhale directly, pungent odour
- rinse with water after contact with eyes or mucous membrane
- corresponds to the BGA (Federal Health Office) recommendation no. XXI

Conseils d'utilisation

- élastique, résistance aux acides et aux bases, solidité à la déchirure, s'enlève sans laisser de résidu
- séchage rapide, max. 10 min.
- ouvrir brièvement, conserver hermétiquement fermé et au frais
- appliquer avec un instrument ou pinceau (rincer le pinceau toute de suite à l'eau)
- ne pas inhaler directement, odeur pénétrante
- après un contact avec les yeux ou les muqueuses, rincer abondamment à l'eau
- conforme à la recommandation BGA no. XXI

Erkoskin 50 ml: 625 050