

Forme de duplication

Matériaux pour travailler

Pour la fabrication:

- Erkoflex, 3,0 - 5,0 mm

Pour la préparation du modèle:

- Cire haute fusion (725 080) pour remplir des bulles dans le plâtre.

Conseils

- La duplication avec Erkoflex n'atteint pas la précision des masses de duplication. Cette méthode peu onéreuse est utile pour les modèles de montre, d'école, de planification, etc.

1. Tailler le modèle plat, mettre sur le disque à modèle de l'appareil de thermoformage et thermoformer.

Laisser refroidir complètement.



2. Positionner l'Erkoflex thermoformé comme illustré sur un anneau ou pot pour que le moule ne repose que sur lui-même. Remplir le plâtre.

