


Materiale da impronta per condensazione ad alta precisione su base di polisilossano, Tipo 3 - bassa densità, alta fluidità (accettato a norme DIN EN ISO 4823:2015)

Massa per la seconda impronta nella tecnica della presa impronta in 2 fasi




Consultare i documenti di accompagnamento

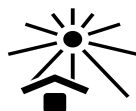

Conservare al riparo della luce solare




Leggere le istruzioni d'uso

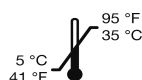

Temperatura di conservazione consigliata



Conservare all'asciutto

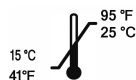

Temperatura di lavoro consigliata

Dosaggio:

Ad una lunghezza di Sitran-F (5 cm = ca. 5,0 g) viene aggiunta mezza lunghezza di pasta indurente (2,5 cm = ca. 0,66 g).

Utilizzo:

Mescolare **Sitran-F** con la pasta indurente per 30 - 45 sec.

Dopo la miscelazione, stendere uno strato sottile sulla prima impronta. Inserire Sitran-F entro 1 min. nella bocca del paziente, tenere premuto per 5 sec., quindi lasciare indurire senza pressione per 3,5 min.

L'impronta deve essere colata al più presto dopo 15 minuti.

**rispondete alle specifiche 93/42 / CEE per i dispositivi medici*

Suggerimenti:

Temperature ambiente elevate accelereranno l'indurimento

Attenzione:

Evitare il contatto del catalizzatore con gli occhi. Evitare di macchiare l'abbigliamento.

Technical data:

La miscelazione può essere effettuata manuale o meccanica.

- tempo di miscelazione:	30 - 45 sec.
- tempo totale di lavoro:	1,5 min.
- tempo permanenza in bocca:	3,5 min.
- setting time:	5,0 min.
- max. deformation under pressure:	6.9 %
- memoria dopo deformazione:	> 98,6 %
- stabilità lineare:	- 0,9 %
- durezza Shore-A:	app. 36
- disinfettabile	
- galvanizzabile	
- tempo consigliato per colare	30 min. - 24 h

L'utilizzatore dei nostri prodotti è l'unica persona responsabile dell'uso e dell'applicazione dei medesimi. La nostra consulenza verbale e scritta deve essere considerata come una consulenza senza impegno anche per quanto riguarda i possibili diritti di protezione di terzi.

L'utilizzatore non ha l'obbligo di controllare personalmente i nostri prodotti per quanto riguarda l'idoneità per l'applicazione prevista. La perfetta qualità dei nostri prodotti è garantita secondo i nostri termini e condizioni generali.

In ogni caso e per tutti i danni, la nostra responsabilità è limitata per il valore della merce da noi fornita.

