

exMod-pro

Gerät zur einfachen Trennung von tiefgezogenen
Alignerfolien von Printmodellen



exMod-pro, Best. Nr. 173 200



Erkodent Erich Kopp GmbH

Siemensstraße 3 • 72285 Pfalzgrafenweiler • Germany

info@erkodent.com • www.erkodent.com



exMod-pro
mit eingehängtem
Print-Modell und
tiefgezogener
Folie, bereit zur
Trennung von
Folie und Modell.

Geeignet für alle
Alignerfolien.




**Print-Modell mit
Einhängetaschen**




Klemmschablone für Folien-
stärken $\leq 0,6$ mm und für
sehr weiche Folien.


exMod-pro-info-DE-08-10-25

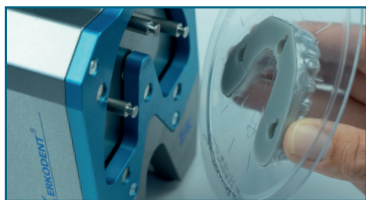

Die Einhängetaschen des
Print-Modells mit der
tiefgezogenen Folie in die
Einhängestifte einhängen
und leicht nach unten
drücken.

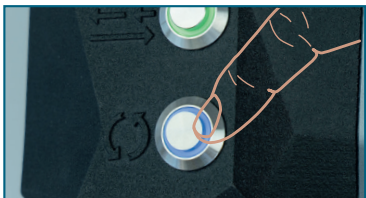

Den blau leuchtenden
Schalter drücken, um den
automatisch ablaufenden
Trennvorgang zu starten.

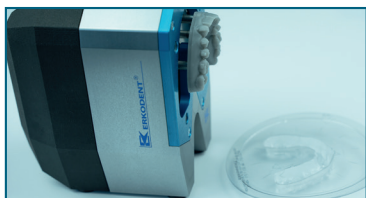

Folie und Modell sind
getrennt. Das Modell kann
ausgehängt werden.