

exMod-pro

INFO ES

Dispositivo para separar fácilmente las láminas de alineación embutidas de los modelos impresos



exMod-pro, N.º de pedido **173 200**



Erkodent Erich Kopp GmbH
Siemensstraße 3 • 72285 Pfalzgrafenweiler • Alemania
info@erkodent.com • www.erkodent.com



exMod-pro

con modelo impreso
colgado y
lámina termoformada,
listo para separar la
lámina y el modelo.


Apto para todas
las láminas de
alineación.




Modelo impreso
con bolsillos de
enganche




Plantilla de sujeción para
láminas de espesores $\leq 0,6$ mm
y para láminas muy blandas.

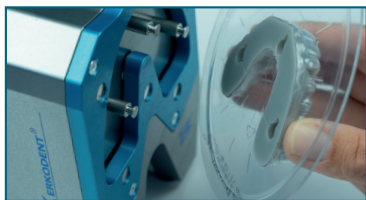

Cuelgue las bolsas de
enganche del modelo
impreso con la lámina
termoformada en los
pasadores de enganche
y presione ligeramente
hacia abajo.

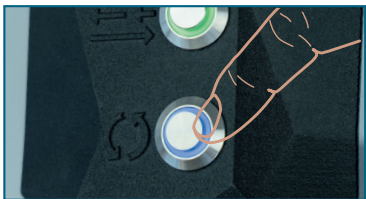

Pulse el interruptor azul
luminoso para iniciar el
proceso de separación
automático.

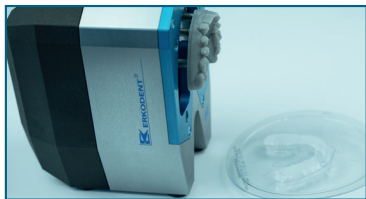

La lámina y el modelo
quedan separados.
El modelo se puede
descolgar.