


# Helm-Strap für American Football

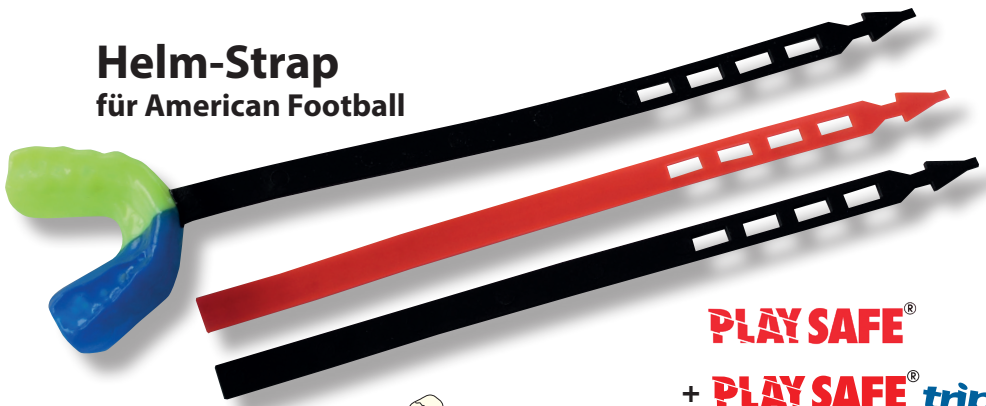


**PLAYSAFE®**

+ **PLAYSAFE® triple**

Anleitung:

- ▶ **1.** Helm-Strap-Ende und Befestigungsbereich am Mundschutz entfetten (Entfetter Best.-Nr. 613 050).
- 2.** Mit dem Heißluftbrenner (Best.-Nr. 177 540) kurz den Befestigungsbereich am Mundschutz erwärmen.
- 3.** Helm-Strap-Ende mit dem Brenner erhitzen und ...
- 4.** ... sofort an den Befestigungsbereich am Mundschutz andrücken, entstehende Wülste mit einem glatten abgerundeten Instrument flachdrücken.

**Achtung:** Diese Arbeiten müssen immer auf dem Modell durchgeführt werden, sonst besteht die Gefahr der Verformung des Mundschutzes.

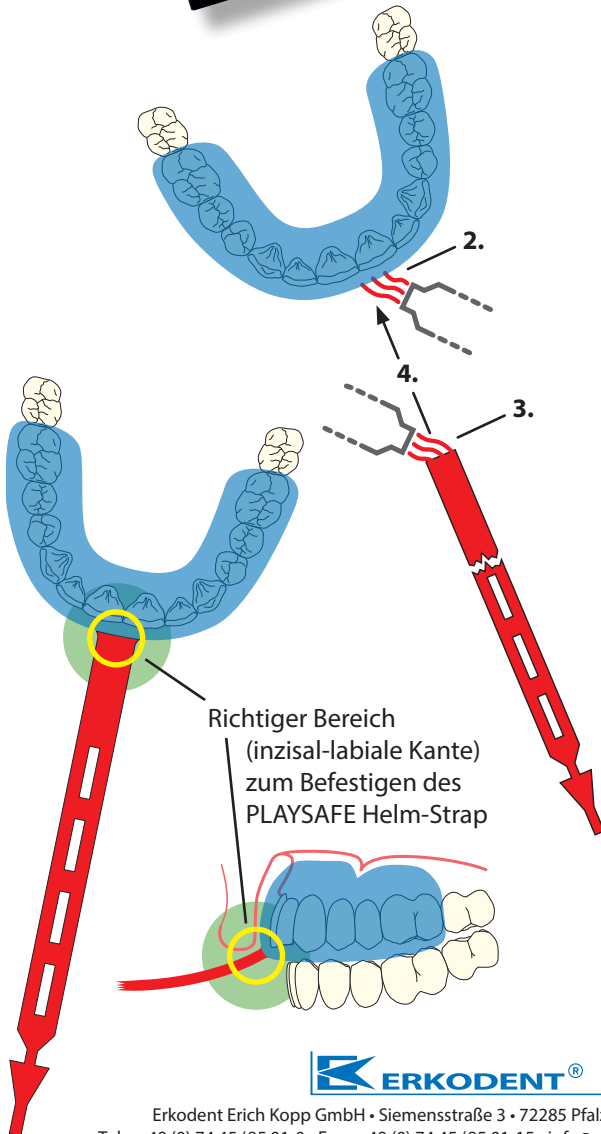

**ERKODENT®**

Erkodent Erich Kopp GmbH • Siemensstraße 3 • 72285 Pfalzgrafenweiler • Deutschland

Tel.: + 49 (0) 74 45/85 01-0 • Fax: + 49 (0) 74 45/85 01-15 • info@erkodent.com • www.erkodent.com