


# Helmet strap

Cinturino casco per paradenti Playsafe

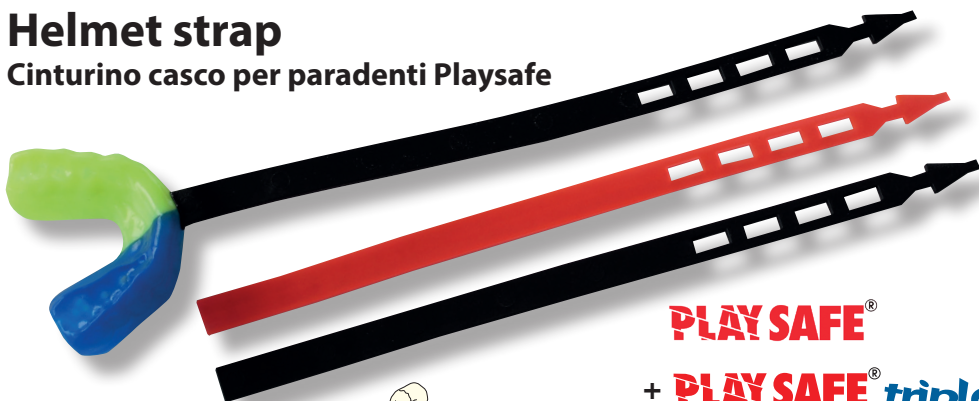

**PLAYSAFE®**

+ **PLAYSAFE® triple**

Istruzioni:


► **1.** Sgrassare l'estremità del cinturino e il punto sul paradenti dove dovrà essere fissato (rif. Sgrassante 613 050).

**2.** Riscaldare il punto sul paradenti in cui la cinghia deve essere fissata utilizzando il bruciatore ad aria calda (numero d'ordine 177 540).

**3.** Riscaldare l'estremità del cinturino del casco con il bruciatore e ...

**4.** ... premere con forza i rigonfiamento che si produce con il contatto con l'aiuto di uno strumento morbido e arrotondato.

**ATTENZIONE!** Questo lavoro deve sempre essere eseguito sul modello, rischio di deformare i paradenti.

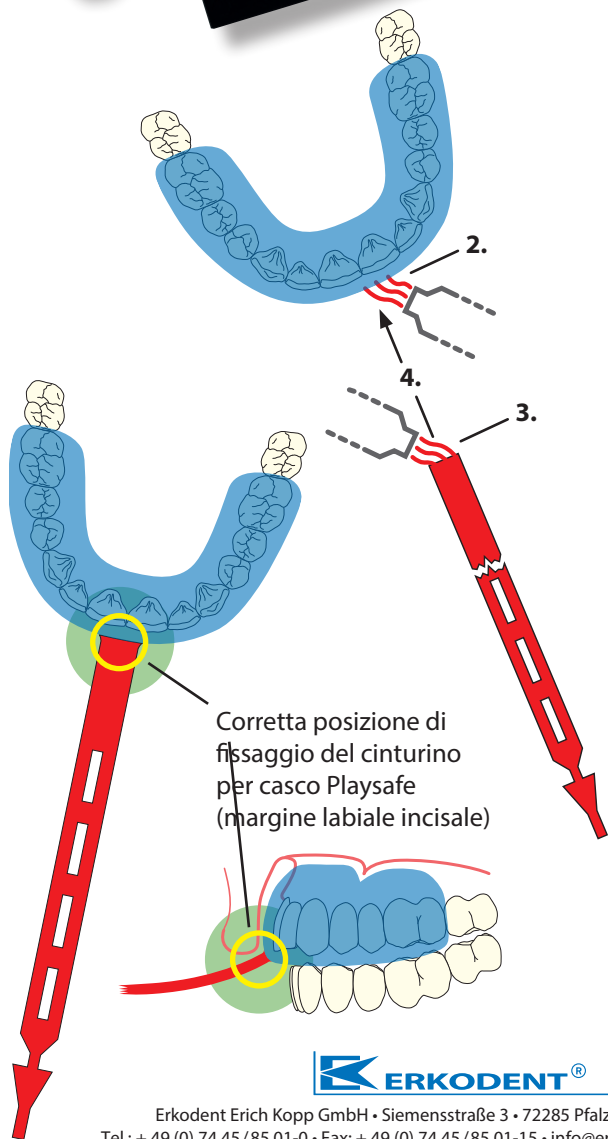

**ERKODENT®**

Erkodent Erich Kopp GmbH • Siemensstraße 3 • 72285 Pfalzgrafenweiler • Deutschland

Tel.: + 49 (0) 74 45/85 01-0 • Fax: + 49 (0) 74 45/85 01-15 • info@erkodent.com • www.erkodent.com