

PLAY SAFE® triple



Erkodent Erich Kopp GmbH
Siemensstraße 3 • 72285 Pfalzgrafenweiler • Germany
Tel. +49 7445 8501-0 • Fax. +49 7445 8501-15
info@erkodent.com • www.erkodent.com



Information und Hinweise

Die vorliegende Informationsschrift gilt für folgenden Sportmundschutz: **Playsafe triple • Playsafe triple light**

CE Erklärung zur Kennzeichnung:

Dieser maßgefertigte Sportmundschutz trägt die CE-Kennzeichnung zum Nachweis der Konformität mit den Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 (Anhang II), PPE (PSA) persönliche Schutzausrüstung gegen mittlere Risiken.

Die Wirksamkeit des Mundschutzes wurden von RICOTEST überprüft, benannte Stelle Nr. 0498, Via Tione 9, 37010 Pastrengo - Verona - Italien, auf der Grundlage von Labortests, die nach einem internen Protokoll durchgeführt wurden. Der Mundschutz hat den Test zur Übertragung der Schlagkraft bestanden. Dieser wurde mit einem flachen Schlagkörper (2,5 kg) durchgeführt wurde, der mit 5 J auf die folgenden Bereiche aufschlug: Inzisalfläche, frontaler, bukkaler und palatinalen Zahnkranz.

Die EU-Konformitätserklärung liegt dieser Informationsschrift bei und/oder ist unter folgendem Link zu finden:
<https://www.erkodent.de/service-download/zertifikate/>

- ▶ **CE** Das „CE“ bedeutet, dass das Produkt die wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 - Anhang II erfüllt.
- ▶ **Erkodent Erich Kopp GmbH** -> Name des Herstellers
- ▶ **Playsafe triple or Playsafe triple light** -> Produktbezeichnung (**Artikelname und Ref., siehe Verpackungsetikett**)
- ▶ **YYYY/MM** -> Herstellungsdatum (Jahr/Monat), siehe Verpackungsetikett
- ▶ **LOT. XXXXX** -> Chargennummer, siehe Verpackungsetikett

Material und Herstellung:

Alle verwendeten Materialien sowie die angewandten Verarbeitungstechniken entsprechen den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425. Nachgewiesene allergische Reaktionen oder Sensibilisierungen auf die verwendeten Materialien sind nicht bekannt.

Einsatzgebiet:

Playsafe triple und Playsafe triple light sind für jede Sportart geeignet. Playsafe triple light eignet sich bei beengten oralen Platzverhältnissen. Die Materialien für Playsafe triple und Playsafe triple light haben eine Dicke von 5,5 bzw. 4,1 mm und sind mit einer harten Zwischenschicht versehen, die den gesamten Schutz umfasst. Sie sind geringfügig härter als andere Modelle, gewährleisten aber einen erhöhten Schutz.

Bei richtigem Tragen und Gebrauch wird dieser Sportmundschutz die Schwere von Verletzungen des Mundbereichs verringern, die durch Schläge beim Sport verursacht werden. Der Mundschutz muss so konzipiert und hergestellt sein, dass der Benutzer unter den zu erwartenden Einsatzbedingungen seine sportliche Tätigkeit in normaler Weise ausüben kann und dabei angemessen geschützt ist.

Hinweise zur Herstellung:

Der individuell gefertigte Playsafe Sportmundschutz passt genau auf die Zähne, verrutscht nicht und ermöglichen ein freies Atmen und normales Sprechen.

Jeder Playsafe Mundschutz wird von einer geschulten Person nach den Playsafe Richtlinien angefertigt.

Sie erhalten Ihren Playsafe Mundschutz in Ihrer Zahnarztpraxis.

Dort wird ein Abdruck von Ihrem Ober- und Unterkiefers genommen. Im zahntechnischen Labor werden dann ein Gipsmodell und der Sportmundschutz hergestellt.

Die Kontrolle der Passform und die Übergabe finden wieder in der Zahnarztpraxis statt.

Jeder Playsafe Mundschutz kann wieder an veränderte Zahnproportionen angepasst werden.

Kostenlose Individualisierung eines Playsafe:

25 Farben stehen für Ihren Playsafe-Typ zur Verfügung: 1- grellrot, 2- grellgelb, 3- grellblau, 4- grellgrün, 5- grellpink, 6- hellblau, 7- transparent, 8- sattrot, 9- nachtblau, 10- maroon, 11- sattgrün, 12- reinweiß, 13- tiefschwarz, 14- gold, 15- silber, 16- camouflagel, 17- lava, 18- tie-dye, 19- rainbow, 20- confetti, 21- Zebra, 22- goldflakes, 23- silverflakes, 24- camouflagel strip, 25- lava-strip. Der Endverbraucher kann seinen mehrfarbigen Mundschutz aus bis zu vier Farben zusammenstellen (aus den Farben 1 bis 15) .

Weitere Informationen finden Sie in den Playsafe Richtlinien:

https://www.erkodent.de/wp-content/documents/products/Playfly_DE.pdf

Pflege, Wartung, Aufbewahrung:

Bitte beachten Sie die Playsafe clean Anleitung, die dem Playsafre triple beiliegt (Playsafe clean 07.2021).

Zur Reinigung Ihres Mundschutzes verwenden Sie am besten das Oxydens Clean Set. Informationen über die Verwendung dieses Sets besuchen Sie bitte unsere Website:

<https://www.erkodent.de/produkte/tiefziehmaterial/oxydens/>

Andernfalls pflegen Sie Ihre Ausrüstung wie im Folgenden beschrieben:

- 1- reinigen Sie Ihren Mundschutz mit Seife und einer Zahnbürste (**keine Zahnpasta verwenden**)
- 2- waschen Sie ihn unter fließendem Wasser ab
- 3- trocknen Sie den Mundschutz mit einem Papiertuch ab und legen Sie ihn zurück in die Box
- 4- spülen Sie den Mundschutz vor jedem Gebrauch unter fließendem Wasser ab.

Wenn der Mundschutz nicht benutzt wird, muss er bei Raumtemperatur gelagert werden. Verwenden Sie keine Trockner oder Heizgeräte.

Zur Vermeidung von Verformungen, den Sportmundschutz belastungsfrei aufbewahren. Setzen Sie den Sportmundschutz nicht über einen längeren Zeitraum direkter Sonneneinstrahlung oder extremer Hitze aus.

Sicherheitshinweise und Einschränkungen:

- **Kein Sportmundschutz kann vor allen Verletzungen schützen.**
- Kauen Sie nicht auf dem Mundschutz herum. Wenn er zerkaut und/oder nicht bestimmungsgemäß verwendet wird, beeinträchtigt dies seine Wirksamkeit in Bezug auf Passform, Schutz und Haltbarkeit deutlich.
- Lassen Sie den Mundschutz sofort austauschen, wenn er Abnutzungserscheinungen, Risse oder Sprünge aufweist oder wenn Sie Zweifel an seiner Beschaffenheit haben.

Haltbarkeit und Entsorgungshinweise:

Die Haltbarkeit des Mundschutzes hängt von der Regelmäßigkeit und Intensität seiner Verwendung ab. Bei täglichem Gebrauch und Tragen sollte dieser Schutz normalerweise 6 Monate lang verwendbar sein. Unabhängig von der Tragehäufigkeit empfehlen wir jedoch dringend, den Mundschutz nach 12 Monaten ab Kaufdatum zu ersetzen.

Achten Sie darauf, dass der Mundschutz am Ende seiner Nutzungsdauer nicht in der Natur entsorgt wird: Bitte beachten Sie die lokalen/nationalen Umweltvorschriften. Weitere Informationen zu diesen Vorschriften erhalten Sie bei den örtlichen Behörden.